

**ご使用前に
お読み
ください**

本キットの取扱い及び検査対象物の取扱い時には、保護措置として手袋及びゴーグルの装着が必要です。ユニットに穿孔しないでください。一旦ロックしたプローブは取り外さないでください。万が一内包液体が漏れた場合、液体の付着した箇所を水で洗い流してください。子供の手の届かない場所で保管ください。全て推奨結果となります。必要に応じて、薬物検査機関にて検査を行うことにより詳細な識別を行う事ができます。

テストの準備

1 Smart-Tip™
プローブを取り外し
てください。



2 疑わしい物質もしくは物体表面からサンプルを採取

植物

ハシシ

Smart-Tip™で
疑わしい物質の
サンプルを採取
します。先端を
検査対象物で完全
に覆って下さい。




先端が検査対象物で
完全に覆われるまで
Smart-Tip™をしっか
り押し付けて、円を
書くように対象物に
こすりつけて下さい。



テストの準備

3 Smart-Tip™
プローブをテスト
ユニットに固定し
ます。しっかりと
押し込んで下さい。

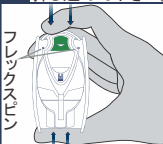


注意

プローブがフレック
スピンで固定されな
いままテストを行わ
ないでください。

検査

4 親指を押し込んで
チェンバー1内の
カプセルを
割ります。

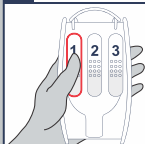


5 テストユニット
を1分間やさしく
シェイクします。



検査

6

親指を押し込んで
チェンバー2内
のカプセルを割ります。

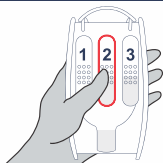

7

テストユニットを
10秒やさしく
シェイクします。



そのまま発色が
完全に落ち着く
まで3分待ち
下さい。

検査結果



3分以内に青紫色や紫色になる場合は、
大麻が疑われます。
手順8へ進み、結果を確認する。



青紫の発色が無い場合、検査対象物はマリファナ
もしくはハシシが検出されなかったことを示します。
場合はそのまま廃棄して下さい。



サイド 2 に続く




サイド2

確認作業


8

親指を押し込んで
チェンバー3内
のカプセルを割ります。

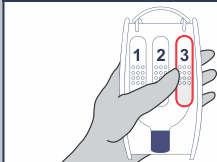

9

20秒間、激しく
振ってください。

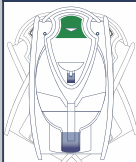

テストユニットを
直立させ、最大2
分お待ち下さい。
チェンバー内が
2層に分かれ
てきます。

結果



2分以内に下層の液体が青紫色や紫色
(極めて淡い色でも)へ変色すると、
マリファナまたはハシシの存在を示めます。

* 発色は時間とともに濃くなる場合があります。



もし下の層が青紫に発色しない場合、マリファナ
もしくはハシシが検出されなかったことを示します。

廃棄方法

廃棄方法

使用済みテストキットは一般ごみとして廃棄可能です。

JPN
0722

オンライン
アクセス

オンライン説明書

<https://adva-tech.co.jp/tkm/>



重要事項

重要事項

1. IDenta Touch&Know[™] Discreet Drug Test Kitsは、粉末や結晶などの物質中の特定の薬物の存在を測定するために使用されます。
2. すべての結果は推定です。必要に応じて、有能な薬物検査室による更なる検査で、さらなる検証を行うことができます。
3. 色の変化は、最初の1分間で起こった場合のみ、リストに記載された薬物の陽性結果を示す。
4. 色の変化は、説明書に記載された薬物のみ陽性であることを示します。
5. 説明書に記載されている時間内に色の変化がない場合、リストにある薬物は検査対象サンプルに含まれていません。